



Zacht siliconen wondcontactlaag


- minimaliseert trauma en pijn™
- transparant en vochtdoorlatend naar een secundair absorberend verband
- kan lang ter plaatse blijven voor een ongestoorde heling
- kosteneffectief

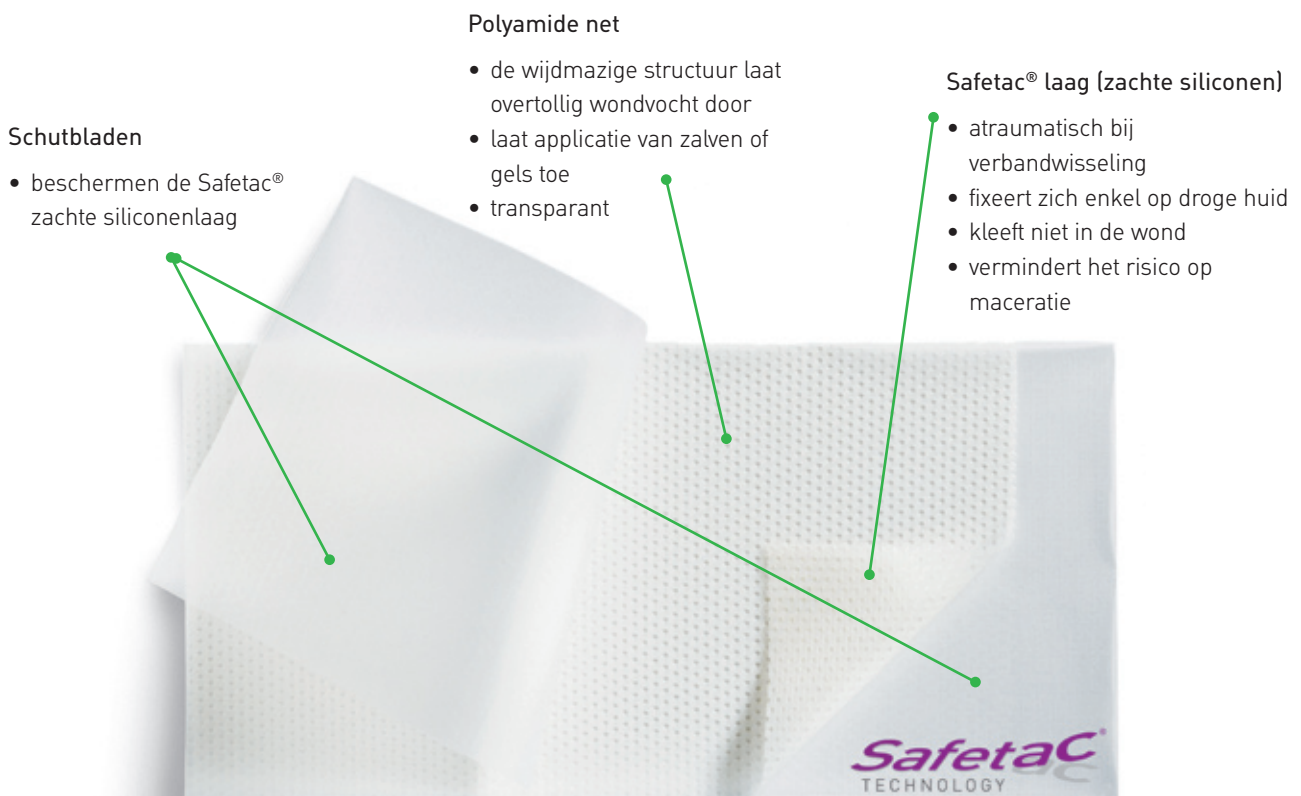


Gebruiksaanwijzing

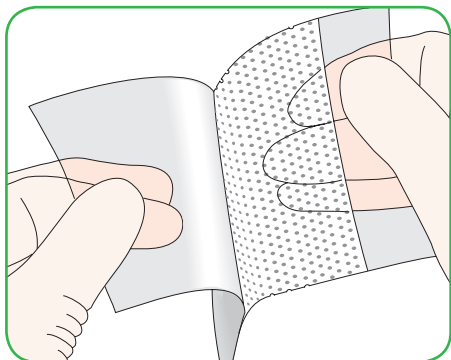

Reinig de wond. De wondomgeving grondig droog deppen. Verwijder eerst het kortste schutblad.

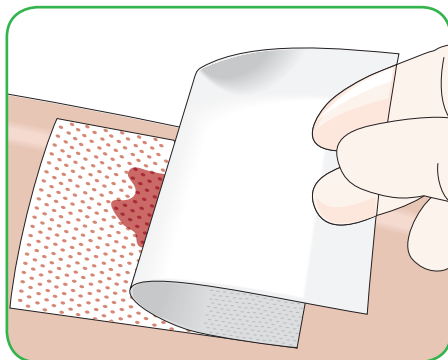

Gebruik vervolgens het 2de schutblad voor een correcte applicatie van het verband. Vergeet nooit het 2de schutblad ook te verwijderen.

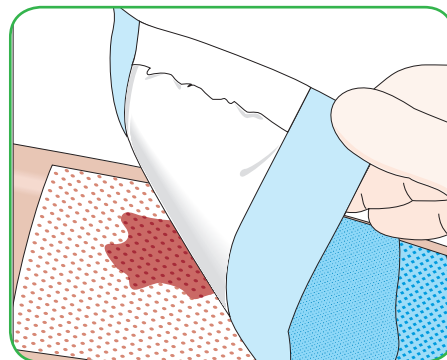

Breng bovenop Mepitel® een secundair absorberend verband aan (bv. Mesorb®) en fixeer met Mefix®, Mefilm®, zwachtel, netverband,

Hoe werkt Mepitel®?

De poreuze structuur van Mepitel® laat wondvocht gemakkelijk door in een secundair absorberend wondverband. Mepitel® voorkomt het verkleven van het absorberend verband in de wond en vermindert zo het risico op trauma en pijn™ bij verbandwisseling. Mepitel® kan verschillende dagen ter plaatse blijven afhankelijk van de wondconditie. Mepitel® laat een ongestoorde wondheling toe.

Voordelen van Mepitel®

- Kleeft enkel op droge huid, niet aan het vochtige wondbed
- Minimaliseert trauma en pijn™ bij verbandwisseling
- Kan meerdere dagen op de wond blijven en verzekert zo een ongestoorde wondheling
- Minder verbandwissels nodig
- Minimaal risico op verweking
- Voorkomt beschadiging van nieuw gevormd weefsel
- Transparant voor een eenvoudige wondinspectie tijdens het aanbrengen en tijdens het dragen

Toepassingen

- droge tot zeer natte wonden
- skin tears
- schaafwonden
- 2de graads brandwonden
- blaarvorming
- huidenten
- diabetes, veneuse en arteriële ulcera
- topletsels
- epidermolysis bullosa

Waarschuwing

Indien Mepitel® wordt toegepast bij brandwonden afgedekt met huidtransplantaten of bij huiddefecten na laserbehandeling, kunnen er bij foutief gebruik van het product afdrucken op de huid ontstaan.

Voorzorgsmaatregelen

- De wond moet regelmatig gecontroleerd worden op infecties. Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.
- Bij brandwonden met huidtransplantaten: vermijd onnodige druk op het verband.
- Bij huiddefecten na laserbehandeling: vermijd druk op het verband. Til om de 2 dagen het verband op en verplaats het een beetje.
- Bij bloedende wonden of wonden met visceus exsudaat: Mepitel® afdekken met een vochtig absorberend verband.
- Bij fixatie van huidtransplantaten: het verband minimaal 5 dagen ter plaatse laten.
- Bij gebruik van zalven of gels: deze bij voorkeur bovenop Mepitel® aanbrengen.

Assortiment Mepitel® (steriel)

Afmeting	Cnk-code/verp.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
5 x 7,5 cm	1183-185	290510	10 x 1 stuk	60 stuks
7,5 x 10 cm	1183-193	290710	10 x 1 stuk	50 stuks
10 x 18 cm	1183-201	291010	10 x 1 stuk	50 stuks
20 x 30 cm	1183-219	292005	5 x 1 stuk	30 stuks

