

Alternerende matras Air2Care

ALTERNERENDE MATRAS AIR2CARE 8 - 86 CM

Alternerende matras ter ondersteuning van de behandeling en preventie van decubitus bij patiënten met een laag tot hoog risico (stadium 1 – 4).

FUNCTIONALITEITEN

Wisseldruk 1-2

Cycluswisseling om de 10 minuten.
Mogelijkheid om elke 15, 20 of 25 minuten aan te passen



4 MODI



Alternating modus: simuleert de natuurlijke bewegingen van de patiënt en helpt decubitus voorkomen.



Max modus: biedt een stevige en stabiele ondersteuning voor de zorg. Veiligheid: schakelt na 30 minuten automatisch terug naar de alternating modus.



Constante lage druk: handhaaft de geselecteerde druk, ongeacht veranderingen in positie of gewicht.



Transportmodus: de matras blijft minstens 8 uur opgeblazen als hij van de compressor is losgekoppeld.



Fowler boost: verhoging van de druk ter hoogte van het zitvlak van zodra de rugleuning meer dan 30° omhoog staat.

Geventileerde cellen: (6 cellen onder de borst) vermindert de risico's veroorzaakt door vochtigheid

Visueel en auditief alarm

Structuur	
Hoeveelheid cellen	Alternerende bovenlaag van 20 cellen
Opblaastijd	+/- 45 minuten
Deflatietijd	30 seconden max (CPR op de compressor en de matras)
Drukniveau	6 niveaus – 13 tot 40 mmHg
Technische gegevens	
Geluidsniveau	Max. 25 dB
Elektrische bescherming	Klasse 2, type B
Elektrische spanning en frequentie	220-240V – 50/60 Hz
Elektrische veiligheid	EN 60-601-1
Elektromagnetische compatibiliteit	EN 60601-1-2
Spatwaterdichtheid	IP21
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen matras	200x86x20cm
Gewicht matras	7,5 kg
Gewicht patiënt (mini-maxi)	25 kg – 180 kg 25 kg – 250 kg (vanaf breedte 100cm)
Afmetingen pomp	26x12x21,5cm
Gewicht pomp	2,5 kg

Referentie	Aanduiding
MA2C8	Matras + pomp
MA2CO4	Enkel pomp
HA2C8	Complete hoos
AU324	Transportzak

Alternerende matras Air2Care

STRUCTUUR

Matras bestaande uit 20 cellen die op hun beurt 2 kamers hebben: de bovenste alternerende kamer en de onderste statische kamer. De onderste kamers vormen samen de statische onderlaag van de matras. Er zijn 3 statische cellen aan de hoofdzijde en 17 alternerende cellen.

HOES

Antibacteriële bi-elastische hoes

Dampdoorlatend en water ondoordringbaar

Volledig verwijderbaar met beschermende flappen

4 riemen aan de onderkant om de matras op te hangen naar het slaoppervlak

4 handgrepen

Brandveiligheid: voldoet aan BS 7175, bron 0, 1 en 5

Machinewasbaar: max. temperatuur 95°C

Droogtrommel: max. temperatuur 60°C

